

HAIDIG®

Kindergartenbedarf – Therapiebedarf – Befestigungslösungen



Schiffschaukel

Maximallast 150 kg

Damit's sicher ist!

HAIDIG GmbH & Co. KG

🏠 Gernotstr. 17 – 44319 Dortmund



☎ +49 (0)231 91 28 156

📠 +49 (0)231 91 28 157

@ info@haidig.de

🌐 www.haidig.de


🛒 www.kindergartenbedarf-haidig.de

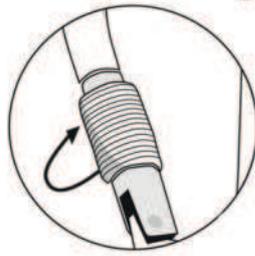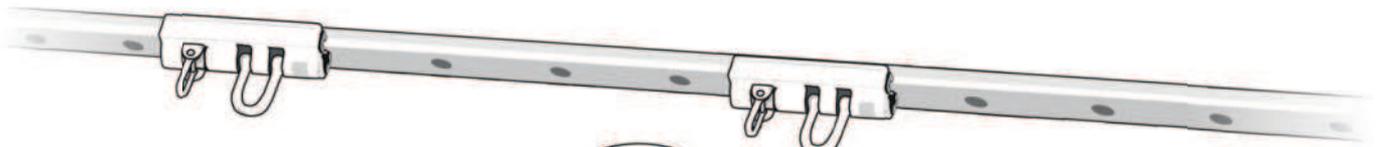

Karabiner separat erhältlich
Art.-Nr.: 113105 / 113106



..... Aufhängetrapez

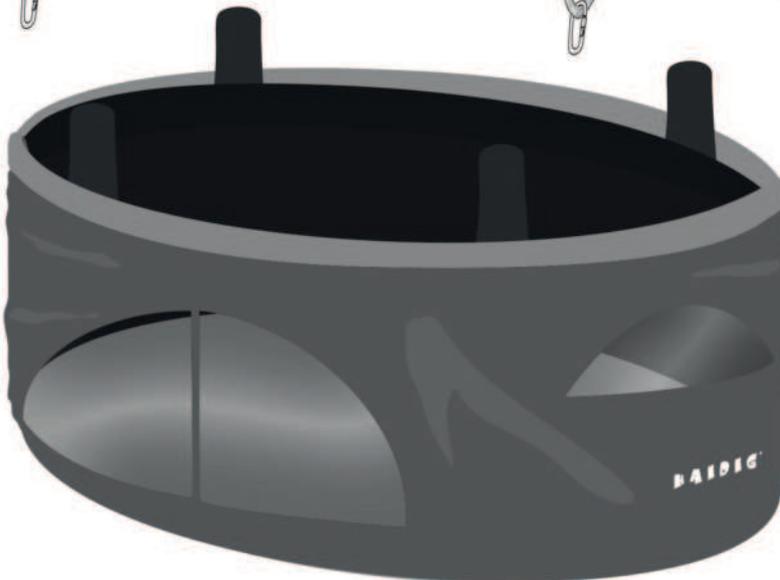

Sicherheitshinweis:

Achten Sie bitte auf eine fachgerechte Montage und verwenden hierfür nur Originalteile des Herstellers!
Prüfen Sie vor jedem Gebrauch alle mechanischen Teile auf ihre Festigkeit.

HerstellereinFORMATION

Schiffschaukel

Hersteller:
HAIDIG® OHG
Amtsgericht Dortmund
HRA 16342

Artikelnummer: 115010

Sicherheitshinweise:

Produkt nur mit ausreichendem Fallschutz und unter Aufsicht bzw. Anweisung von geschultem Fachpersonal einsetzbar.

Bitte angemessene Kleidung, wie Sportkleidung, Turnschuhe o. Ä. tragen und Uhren sowie Schmuck (Ringe, Halsketten, Armreifen, Ohrringe, Piercings o. Ä.) ablegen.

Maximallast	150 kg
Größe	ca. 120 x 60 x 35 cm
Eigengewicht	ca. 11 kg
Material	Cordura, dunkelblau / rot Polypropylengurtband Multiplexplatte mit Schaumstoff gepolstert
Zubehör	inkl. 2 Sitzkissen in rot, am Boden mit Flett / Flauschband fixiert und 2 Aufhängetrapeze mit 16 mm Hempex PP-Seil mit Stellacht, inkl. 4 Sicherheitskarabiner

Einsatzmöglichkeiten:

In Kindergärten und Kindertagesstätten, Familienzentren, ergo- und physiotherapeutischen Praxen, Frühförderstellen, Ganztagschulen, sowie in der Integrations- und Behindertenarbeit.

Anwendungsmöglichkeiten:

Die Schiffschaukel kann an einem Deckenaufhängungssystem an **zwei** Punkten aufgehängt werden (empfohlen wird unser HAIDIG® T-Schienenensystem).


Beurteilungskriterien:

- Zur intensiven Bewegungsfindung
- Förderung der Körperkoordination
- Aktivierung der Aufrichtreaktion
- Unverzichtbar für z. B. Gleichgewichtsübungen, Tonusregulation, Arbeit mit der Schwerkraft


Pflege und Reinigung:

Cordura ist ein robustes und unempfindliches Material. Trockener Schmutz lässt sich leicht herausbürsten. Bei stärkeren Verschmutzungen kann mit Wasser und einer Seifenlösung vorgereinigt werden. Bitte vermeiden sie eine extreme, mechanische Reinigung, diese kann zur Beeinträchtigung des Oberflächenmaterials führen. Desinfektion bitte ausschließlich mit alkoholbasierten Desinfektionsmitteln (Ethanol / Propanol). Die Verwendung anderer Substanzklassen können zu irreversiblen Beschädigungen der Oberfläche und des Materials führen. Verwenden Sie keine Lösungsmittel!

Anwendungsbeispiele

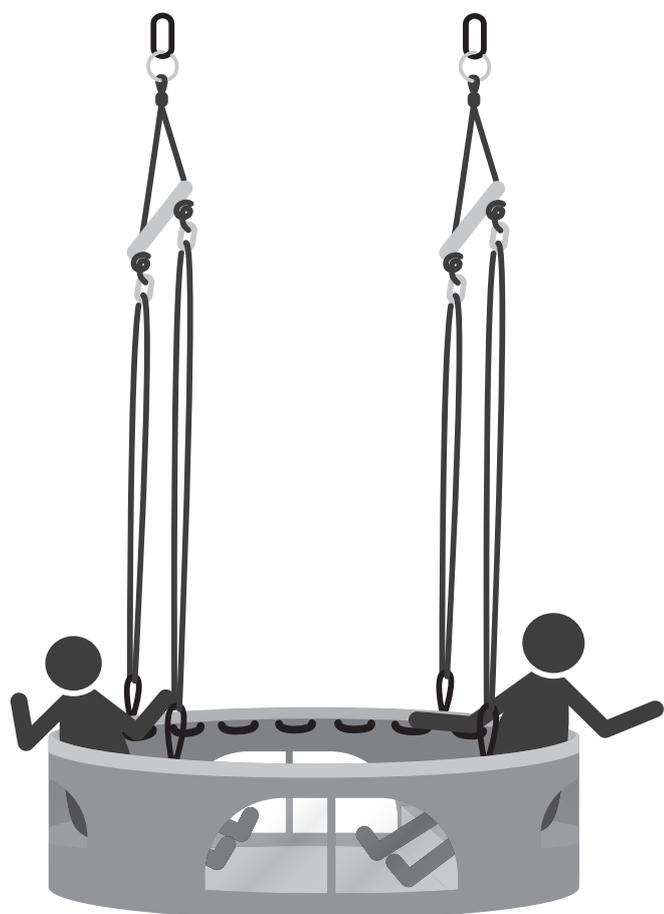

2 Kinder gegenüber sitzend auf herausnehmbaren Sitzpolstern

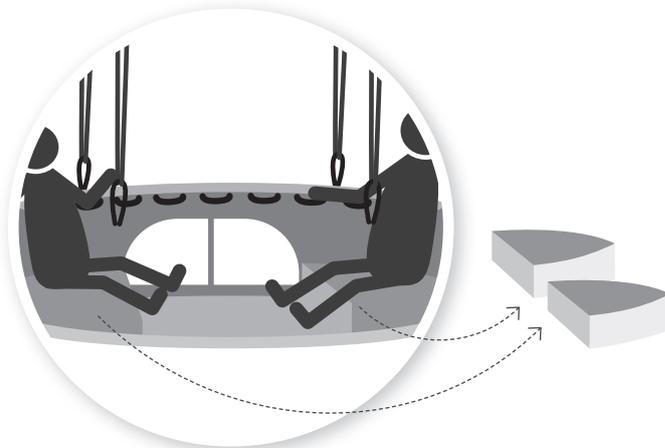

Ohne Sitzpolster entsteht eine Wanne und so können 1 - 2 Säuglinge darin liegen und sich an den umliegenden Griffschlaufen festhalten.



Schwebende Takttilwanne

- Bälle aus Bällebecken
- Naturbäder (Kastanien, Laub)
- Thera Beans